执业医师 24 项基本技能虚拟仿真训练系统

使用说明

一、软件运行环境:

- 1) PC 端运行环境
- A. 系统要求

Win10

B. 浏览器要求

建议使用浏览器: Chrome、火狐(极速模式)、360(极速模式)

- 2) 移动端运行环境
- A. 系统要求

安卓 IOS 鸿蒙

B. 浏览器要求

建议使用系统自带浏览器

二、登录操作:

连接校园网或者医院内网。

打开浏览器, 输入如下网址登录虚拟仿真平台。

http://210.42.120.240:8002/zxyj/#/login

建议:请将该网址收藏至浏览器收藏夹内,便于后续登录。



移动端收藏设置:

11:06 € 💭 11:06	2° IL [*] (2)	間間常量 11:07			■ "al 🛠 🚯 🐼 🕸 🕮 11:07
③ 119.3.9.106/yjpt/#/ ○ 0%	く 编辑网址	确定	③ 119.3.9.106/yjpt/#/	0 %	
(脑床基本技能虚拟仿真训练系统	名級 阿址 虚拟仿耳训练 http://119.3.9.106/yjpt/#/ 添加至		() (临床基本技能虚拟仿)	真训练系统	
8 講输入您的账号/手机号			8 请输入您的账号/手机号	;	
请输入您的密码 ··· ·	网址收藏 主页图标	手机桌面	□ 请输入您的密码	Here and	
忘记密码?	位置:网址收藏	5		忘记密码?	
○ 立即登录 Q ⁶ 分享			문 录		
日本			添加到主屏幕 虚拟仿真训练 1×1 取消	添加	

收藏网址 → 编辑网址 → 选择手机桌面 → 添加到主屏幕

三、账号设置**:**

用户初次登录后,请前往"账号设置"页面更换新密码,设置找回密码的问题 和答案。

智昕医教虚拟仿真训练平台		じ 退出
	账号设置	
美活動画売均定時001	修改密码	
教师	原密码: 通输入原密码 Ф	
命 首页	新 瓷码 : 请输入新密码 •	
名课程任务 >	确认新密码: 请确认新密码 •	
分表式中心 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	密码问题设置	
山 学习资料 どう	问题: 你的幸运数字	
名 我的学生 Y	答案: 7	
∨? 虚拟仿真训练		
久 账号设置	平机号码: 18712341235 更换手机号码	
	上传头像	
	лечж: С	
	R036 Why.	

四、首次使用虚拟仿真训练:

1) 移动端使用虚拟仿真训练



直接打开训练项目即可

2) PC 端首次使用虚拟仿真训练

部分训练项目首次使用时需要下载客户端。具体步骤如下:

第一步,点击侧边栏"虚拟仿真训练"进入虚拟仿真训练选择页面,系统弹出 下载提示,点击"下载"按钮。(如果已经安装过插件,忽略此提示)

刘老师 秋日				_	
0 80 9 \$1054.016 ()	Enema	Aspiration of sputum	Gastrointestinal decompression	
值 白主学习 13 新版管理 3. 我的学生	×	准防术 国际不是将一定量的成体由们门经直转重入结 新,以这些确定合新和3合行目的的技术。	提示 1.进行虚拟仿真训练弟,请 首先下载安装者户端。 ② 2.建议使用chrome观赏器进行虚拟仿真训练。	× 紅葉原理。 经量面管将更属于 原来体现出体外的一种用肌外	肌肉 割肉、1
以、用户管理 2、账号设置	×	Delivery	11版:加州(2月1603)(2版,下載数11版), 済在18月5下載 18、19月下載2008時に、、 載加2	efibrillation	
		自然分娩助产术 显标声率几及非调整从临产开始到全部从母体 娩出的技术。	成人基础生命支持 又称为现场参数,是指在事支的现场,对抗人 实施及时,者效的制步数户,是专业或非专业 人员出行逐手给数,分为网际投资和这种/十二	电除颤 过前网络能量的电影中时心能进行黑色非同步 电击,以终止心室翻闭(包括心室补动)。	产科 为近3 指面。 预防部

第二步,页面左下角出现下载提示,选择"完成时打开"

	完成时打开(D) 总是打开此类文件(A) 暂停(P) 在文件夹中显示(S) 取消(C)	天館观念 医應沟通 天尓 女业技能 安山浜前 佐藤市思维
in zxmedicine-platfexe 已下载 9.9/53.2 MB,还需	~	

第三步,系统弹出运行提示,选择"运行"。

当前天	× こ法访问 > SmartScreen			
检查你的 Internet 连接。无法访问 Windows Defender SmartScreen,因此无 法帮助你确定是否可以运行此应用。				
发布者:	未知发布者 ViliasEntrassa ava			
应用:	TDiaoenti ance.exe			
	k .			
	运行 不运行			

选择选择信任该程序,并按照安装提示安装即可。

第四步,安装完成后,再次点击"开始训练",弹出提示框,点击"打开 zxmedicine-platform.exe",即可开始训练

	要打开 zxmedicine-platform.exe 吗?					
	http://119.3.9.106 想打开此应用。		し 退出			
	② 打开 zxmedicine-platform.exe 取消					
灌肠术 *****(0分) 灌肠术是将一定量的液体由肛门经直肠灌入结肠,以达到确定诊断和治疗目的的技术。						
		① 开始训	东 课前学习 课后巩固 参加挑战			
	3111/4方 3/27米/1	亚拉地比哈姆	油戶加田正确変			

说明: 首次使用需要下载动画、模型资源, 请保持网络通畅。