

SimNewB连接使用指南

第一步:打开给模拟人专门配置的路由器，揭开模拟人右腹部下方的面皮。给 SimNewB模拟人插上电源，并且打开电源开关，POWER(①) 为电源插座，轻按电源符号(②) 一下模拟人为开。如下图：




(模拟人左下腹部)


第二步: 打开电脑的无线网络设置，找到路由器的名字并且连接上。打开软件 LLEAP，



Laerdal Simulation Home



。在打开的页面中选择 ，进入模拟人选择界面，如下图

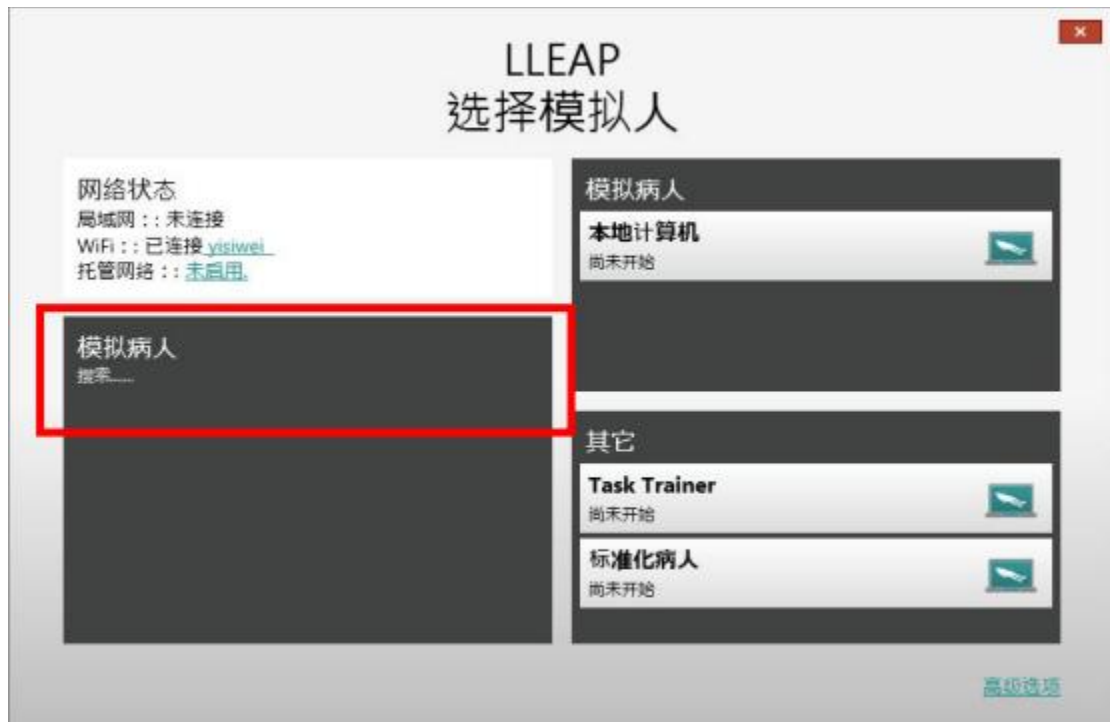

(模拟人类型选择界面)



在模拟病人这一显示栏里会看到模拟人：
后点击图标即可连接到模拟人。

。然

第三步： 点击选择模拟人进入如下界面，点击手动模式（如有选择用户偏好请选择国际用户）进入模拟人操作界面。



第四步：选择对应的病例主题，如没有请选择 Healthy patient进行模拟人操作。




第五步：进入如下界面表示模拟人连接成功可以正常操作。




连接模拟人监护仪

第一步：打开监控仪电脑的无线网络设置，找到路由器的并且连接。打开软件

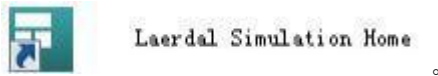

页面中选择 ，进入模拟人选择界面，如下图：

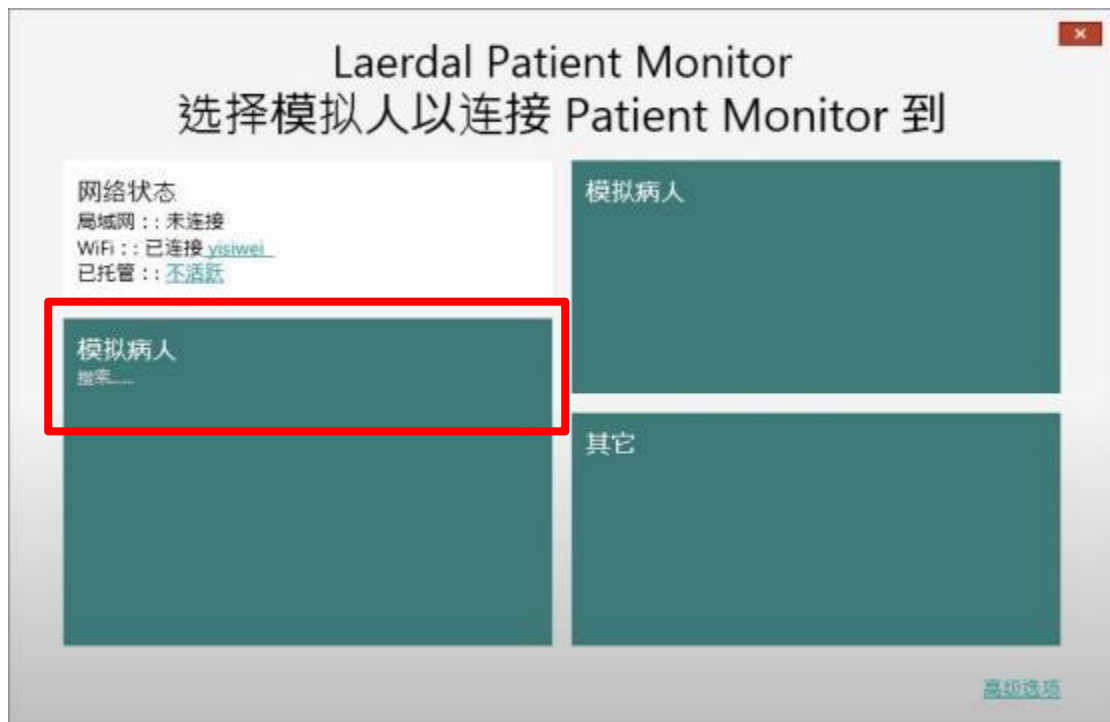

(监控仪选择模拟人界面)



第二步：在模拟病人这一显示栏里会看到模拟人：

然后点击图标即可连接到模拟人，连接完成后会自动跳转到监控仪界面。如下（连接成功）

