



## 快速上手指南

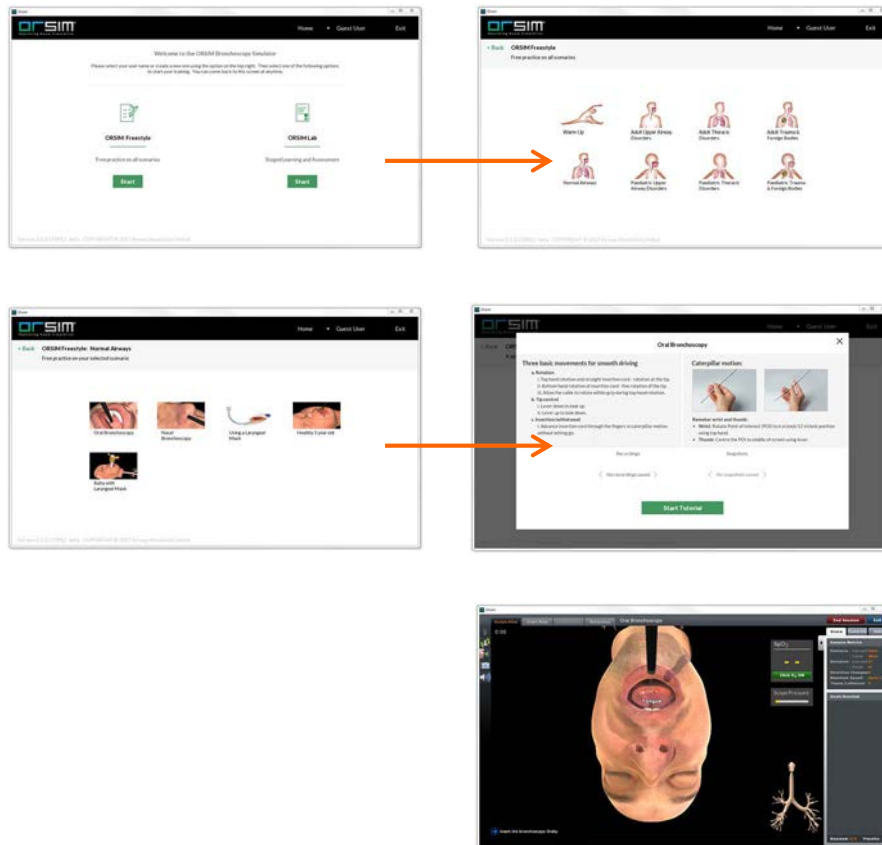

1. 点击桌面ORSIM Bronchoscopy Simulator，等待系统加载。
2. 点击User Name下拉选择账号，一般使用guest即可。
3. 输入账号信息并点击OK，一般使用guest即可。
4. 选择 **ORSIM Freestyle**。
5. 选择 **Normal Airways** 教程组。
6. 选择 **Oral Bronchoscopy** 课程。
7. 点击**Start Tutorial**并等待加载。

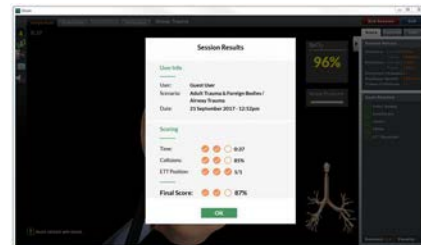

8. 将模拟支气管镜的镜头部分插入传感器模块，确保插入部白色部分正对自己，黑色部分正对外。(见6页)
9. 经口支气管镜教程将激活。
10. 遵循屏幕左下角列出的目标完成训练。
11. 当完成所有既定目标，移出支气管镜显示评分。
12. 关闭训练评分。
13. 使用屏幕下方回放栏回放训练。
14. 可根据需要保存当前训练，在屏幕左下角
15. 如需重新练习该教程，点击New Session。
16. 如需退出该教程，点击Exit。