

# HystVision 开机使用指南

## 一、开机

- 1、主电源线接通电源，按下台车下部右侧开机，等待系统启动



- 2、自动进入软件初始界面（下图），可选择系统语言与用户名



- 3、建议选择演示账号（下图 Default 组-Sample User 用户），防止后续资料增加导致软件运行缓慢。选择“接受”进入训练模块



- 4、训练界面包含泌尿电切镜训练、宫腔镜训练、课程、历史数据、教学素材、用户选择等选项，按需求选择训练项目
- 5、开始训练后，按提示保证鞘液泵入出水口均关闭，等待 1min 中加载（期间反复开关进出水阀），触控屏面板会出现控制界面（如下图），显示屏面板会出现模拟鞘液泵界面

